

 oti FAES



TAPONOX[®]

SPRAY ÓTICO




Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto
auditivo externo respetando el pH

 FAES FARMA

oti FAES

TAPONOX®
SPRAY ÓTICO

Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto
auditivo externo respetando el pH

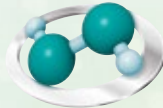

Aplicar
4 ó 5 pulverizaciones 3 veces al día
durante no menos de 3 días

C.N. 1814784



Dr./Dra. _____

Fecha: _____

Recomendaciones: _____

FAES FARMIA

La **cera** es una secreción natural que protege el conducto auditivo externo. Sin embargo, se puede formar un tapón en el oído a causa de su **acumulación excesiva**. Los **síntomas** más frecuentes son dolor de oído, sensación de taponamiento, ruidos en el oído (tinnitus) o pérdida de audición parcial.

Recuerda que:



- No se aconseja limpiar los oídos con demasiada frecuencia o fuerza; la cera también ayuda a proteger el oído.
- Tratar los tapones de cera de forma errónea (bastoncillos, velas de oído...) puede provocar problemas como la otitis externa.



Oti Faes TAPONOX® es un spray ótico de **uso domiciliario** que ayuda a la eliminación de los tapones de cera **respetando el pH** fisiológico del conducto auditivo externo y permite una administración fácil y eficaz:



Inclinar la cabeza y separar ligeramente el pabellón auricular hacia atrás



Aplicar y mantener 5 minutos la cabeza ligeramente inclinada



Girar la cabeza en sentido opuesto y secar el líquido



Limpiar con agua el aplicador, secarlo y guardarlo


Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto auditivo externo respetando el pH

oti FAES

TAPONOX®
SPRAY ÓTICO



El spray ótico **Oti Faes TAPONOX®** ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto auditivo externo gracias a la combinación del peróxido de hidrógeno y de un complejo estabilizante que contribuye al mantenimiento del pH adecuado

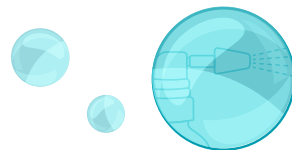

Aplicar **4 ó 5 pulverizaciones**
3 veces al día durante
no menos de 3 días

FAES FARMA