

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar Oti Faes TAPONOX®. Consulte a su médico o farmacéutico si necesita información adicional o algún tipo de aclaración. Si su problema empeora o persiste consulte con un especialista.

¿Qué es Oti Faes TAPONOX® y para qué debe ser utilizado?

El spray ótico Oti Faes TAPONOX® es un producto que ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto auditivo externo.

Oti Faes TAPONOX® se presenta en frasco de 45 ml con aplicador ótico.

El ingrediente activo es peróxido de hidrógeno, el cual actúa liberando oxígeno y rompiendo el tapón en fragmentos más pequeños y fáciles de eliminar. En algunos casos evita incluso la necesidad de irrigación.

Además del peróxido de hidrógeno, este producto contiene un estabilizante que actúa a modo de tampón permitiendo mantener un pH ligeramente ácido, acorde con la fisiología del conducto auditivo externo.

Aplicación de Oti Faes TAPONOX®

La aplicación de Oti Faes TAPONOX® se realiza a través de una bomba dispensadora especialmente diseñada para la administración en el conducto auditivo externo tal y como se explica en el dibujo.




Inclinar la cabeza y separar ligeramente el pabellón auricular hacia atrás.



Introducir ligeramente el aplicador en el conducto auditivo externo y realizar 4 ó 5 pulsaciones permaneciendo con la cabeza inclinada durante aproximadamente 5 minutos.



Girar la cabeza en sentido opuesto para evacuar y secar el líquido.

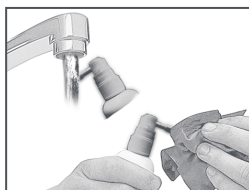

Limpiar el aplicador con agua, secarlo y guardarlo hasta la siguiente aplicación.

Repetir la aplicación tres veces al día.

En caso de utilizar prótesis auditiva, ésta debe retirarse antes de utilizar Oti Faes TAPONOX®.

¿Quién no debe usar Oti Faes TAPONOX®?

- Personas con alergia al peróxido de hidrógeno.
- Quienes sufran mareos o cualquier tipo de otitis (por ejemplo: dolor, infección, supuración).
- Quienes padezcan o sospechen que puedan padecer de perforación / afectación del tímpano.
- Quienes padezcan de acúfenos y/o tengan un historial previo de problemas de oído.

Precauciones y posibles efectos secundarios

Oti Faes TAPONOX® no presenta interacciones con ningún tipo de producto o medicamento que esté tomando. No debe aplicarse con otro producto de administración ótica.

La liberación de oxígeno puede provocar una sensación temporal de burbujeo.

Se ha descrito que las soluciones óticas pueden ocasionar malestar, pérdida auditiva, mareos y acúfenos (pitidos en el oído). Si el paciente sufre estos efectos deberá cesar en sus actividades de conducción / uso de maquinaria peligrosa.

Más raramente se ha descrito que pueden provocar sabor de boca desagradable.

No rellenar el envase.

Respetar la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.

Este producto puede manchar la ropa.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua.

No ingerir.

En caso de intoxicación contactar con el Servicio Nacional de Toxicología: 91 562 04 20.

Condiciones de almacenamiento

Mantener lejos del alcance de los niños.

Aunque el envase no haya sido abierto, no se debe utilizar una vez superada la fecha de caducidad indicada en el mismo.

Mantener entre 2° y 30°C.

Composición

Peróxido de hidrógeno 3%.

Solución estabilizante.

Fecha de la última revisión del texto: Abril 2016



Mitelos Bioscience S.L. Parc Tecnològic del Vallès.
Ronda de Can Fatjó 7-B.
08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona, España

Distribuido por:

 FAES FARMA

PANTONE

425C